

MARQUARDT MEDIZINISCHE GESICHTSMASKE



HAUPTMERKMALE

- CE Kennzeichnung
- EN14683:2019+AC:2019 – medizinische Gesichtsmaske TYP IIR
- Integrierter, anpassbarer und langlebiger Nasenbügel
- Auf Hautverträglichkeit getestete Bänder

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Äußere & innere Vliesstoffe:

- PP Spinnvlies
- PET / PP Vliesstoff für erhöhten Tragekomfort

Filterschicht:

- PP schmelzgeblasenes Vlies

Nasenbügel:

- HDPE-beschichteter verzinkter Draht, Drahtdicke 0.5 mm

Elastisches Band:

- Polyamid / Elastan Gummibänder

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die medizinische Gesichtsmaske dient dem Fremdschutz, welche Mund und Nase bedeckt und eine Barriere darstellt, um die direkte Übertragung infektiöser Tröpfchen zwischen Personal und Patienten zu minimieren.

WARNUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN


- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt korrekt angelegt ist.
- Entsorgen Sie die Maske am Ende einer Schicht. Der Maskenkörper sollte nicht mit den Händen berührt werden.
- Nach dem Abnehmen der Maske sollten die Hände gewaschen oder desinfiziert werden.
- Der Maskenträger ist nicht gegen infektiöse Keime geschützt.
- Verwenden Sie die Maske nicht in einer Weise, die nicht in der Gebrauchsanweisung angegeben ist.

ZULASSUNGEN UND STANDARDS

- Medizinische Filterhalbmaske nach EN 14683 Typ IIR
- Bakterienfiltrationseffizienz $\geq 98\%$



Produktnummer 7112.5001

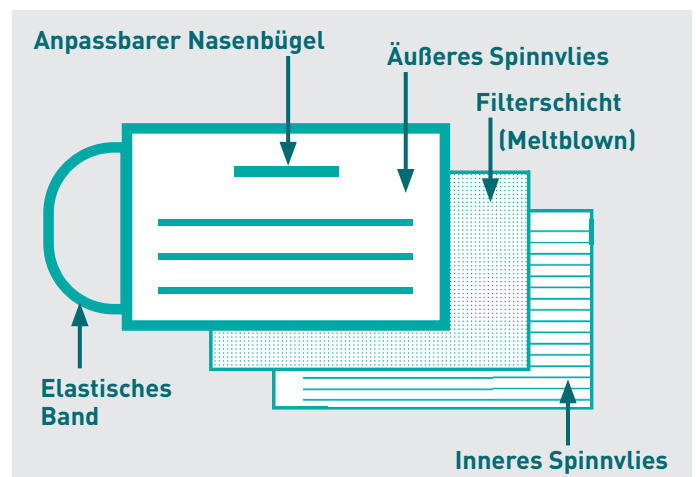

ZEITLICHE NUTZUNGSBESCHRÄNKUNG

Einmaliger Gebrauch, maximal eine Schicht. Die Maske kann solange verwendet werden, bis sie beschädigt ist, das Atmen erschwert wird oder das Material mit Flüssigkeit getränkt ist.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

- 2 Jahre ab Herstellungsdatum in Originalverpackung.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass das Produkt noch innerhalb der Lagerdauer liegt. Das Produkt sollte sauber, trocken und im Temperaturbereich von -5 °C und $+40\text{ °C}$ bei einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 60% gelagert werden.
- Für Lagerung und Transport die Originalverpackung verwenden

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung unter folgendem Link:

www.marquardt.com/Schutzmasken

